

## MANUAL INSTALACION ESCUDO FACIAL ANTIFLUIDOS ICES

	Sacar el escudo facial de la bolsa
	Quitar el plástico blanco de protección de las piezas, en la visera la protección viene en ambos lados de esta, en el escudo únicamente viene de un lado, por lo que debemos de retirarlo del lado opaco, el lado brillante no cuenta con protección blanca.
	La visera viene con un amortiguador para frente, y un listón elástico con un ahorcador que puede ajustarse al tamaño de la cabeza de la persona que va a usarlo.
 <p><b>VISERA</b>      <b>ESCUDO</b></p> <p><b>DOBLE ORIFICIO</b>      <b>UN ORIFICIO</b></p>	Colocar la visera hacia arriba con los dos orificios del lado derecho, viendo la visera de la parte abierta, en el escudo deberemos buscar un orificio en el primer par de sujeción y con el empezaremos a instalar el escudo.
	En caso de requerirlo puede instalar la correa de soporte de la cabeza, normalmente no se utiliza, pero en caso de necesitarla, puede ajustarla al tamaño de su cráneo, normalmente sugerimos del inicio dejar 2 orificios y sujetarlo del 3 espacio en ambos lados.

*Cualquier duda comentario o sugerencia, favor de visitar  
nuestro sitio web:*

<https://www.icestabasco.com.mx/escudos-faciales/>

via email: [ventas@icestabasco.com.mx](mailto:ventas@icestabasco.com.mx)

teléfono: 9936886923



Video de ensamble  
escudo facial